


STAP 1: Bevestig de ECG-elektroden zoals afgebeeld in Afbeelding 1 en meet de amplitude van de R-golf piek-piek in de 2 lichaamshoudingen die worden vermeld op de volgende pagina. De gemeten amplitude van de R-golf moet voor beide houdingen **0,4 mV of meer bedragen**.


Afbeelding 1. Voorbeeld configuratie elektroden

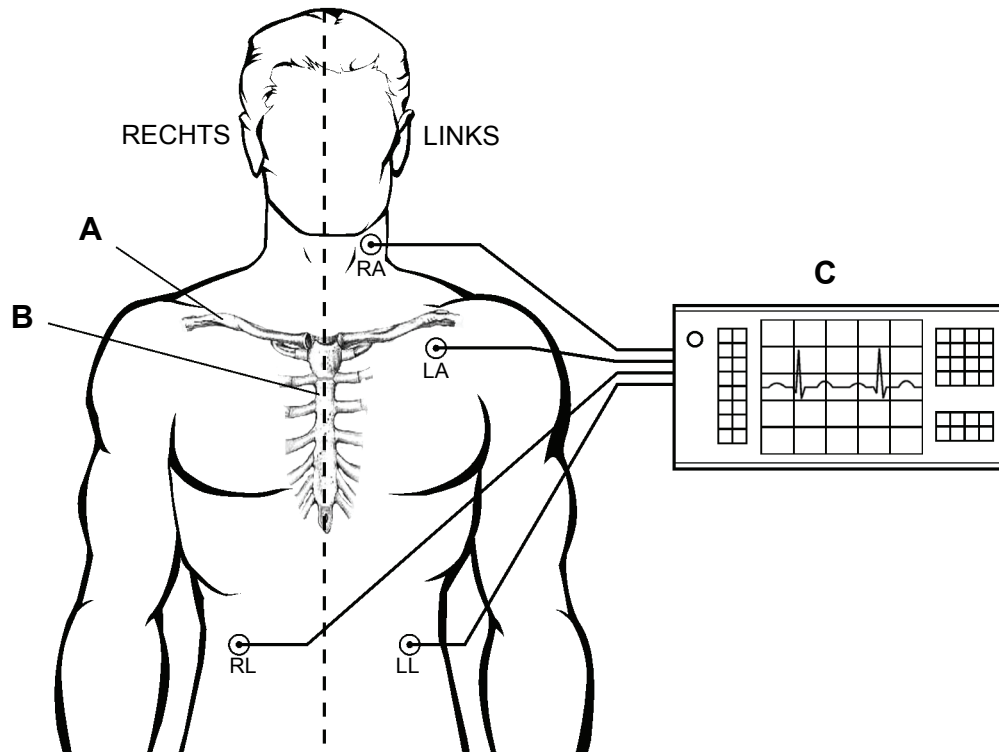

- A Sleutelbeen
- B Borstbeen
- C ECG-monitor

- RA - Geplande implantatiepositie van de geleiderelektrode
- LA - Geplande implantatiepositie van de generator

STAP 2: Wacht tot het ECG stabiel is vóór afdrucken of opslaan. Meet voor elke houding/ECG-strook de piek-piekamplitude van ten minste 4 representatieve R-golven op kanaal van geleider 1. Noteer de minimum amplitude voor elke houding. Alle metingen **moeten $\geq 0,4$ mV zijn.**

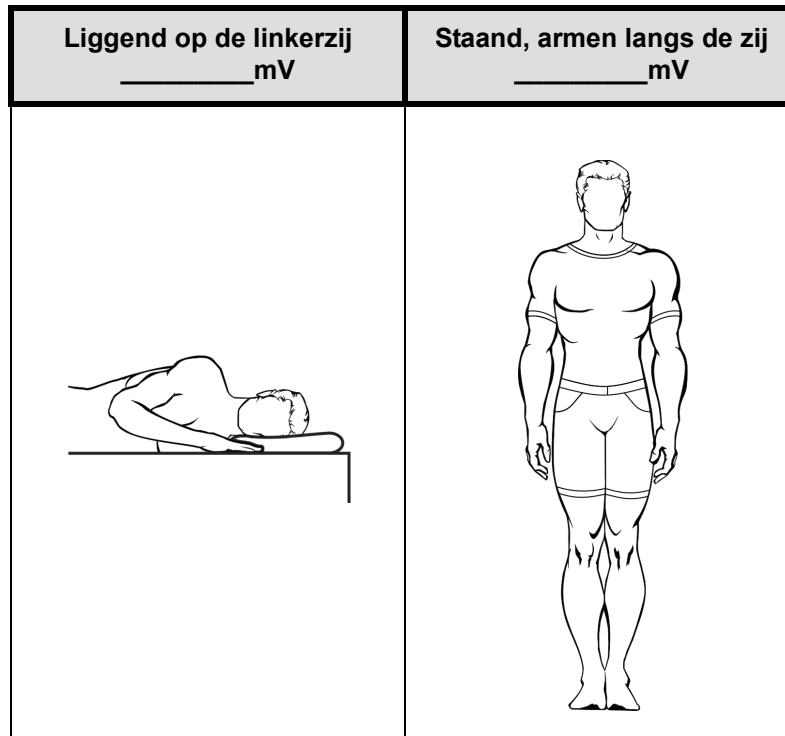

STAP 3: Vul de onderstaande tabel in met de gemiddelde amplitudewaarden van de R-golf die u hebt gemeten in de verschillende lichaamshoudingen en selecteer de overeenkomstige instelling voor Hartslagdetectie (te programmeren bij implantatie van pulsgenerator).

Instelling Hartslag- detectie	Gemiddelde amplitude (mV) (voor verschillende houdingen)	
	Minimum	Maximum
5	0,40	0,50
4	0,51	0,70
3	0,71	0,85
2	0,86	1,25
1	1,26	-----

Gemiddelde amplitudewaarde R-golf: _____ mV

Instelling Hartslagdetectie per patiënt _____

Voorbeeld: Als de gemiddelde amplitudewaarde van de R-golf van de twee patiënthoudingen **0,6 mV** is, dan is de instelling voor Hartslagdetectie van die patiënt **4**.

Verenigde Staten:
Cyberonics, Inc.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058, VS
Tel: +1 (281) 228-7200
1 (800) 332 13 75 (VS en Canada)
Fax: +1 (281) 218-9332

Europa:
Cyberonics Europe, BVBA
Airport Plaza - Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
B-1831 Diegem, België
Tel: +32 2 720 95 93
Fax: +32 2 720 60 53

Klinische technische ondersteuning
Tel: 1 (866) 882 88 04 (VS en Canada)
+1 (281) 228-7330 (internationaal)
+32 2 790 27 73 (Europa/EMMEA)

Internet: www.VNSTherapy.com